


体位変換器

体位変換器とは「空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く」と介護保険制度で定めています。この原理を応用したり、身体と床面の摩擦抵抗を少なくしたりすることで、寝返りなどの姿勢変換の介助を容易にします。動力により周期的な体位変換を促す商品もあります。

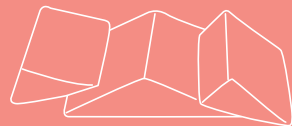

サービスコード 体位変換器:171006

スモールチェンジ ラグーナ ケープ

非課税

15分毎に小さな体位変換を自動で繰り返す「スモールチェンジ機能」搭載



自動で小さな体位変換を繰り返す



SMALL CHANGE LAGUNA

■スモールチェンジで床ずれ防止

右上半身、左骨盤を持ち上げる 左上半身、右骨盤を持ち上げる

スモールチェンジは、骨盤を中心に対角線状の小さな体位変換を約15分毎に自動で行う機能で、床ずれを防ぎます。上半身と下半身を大きく左右いずれかの方向に傾け、長い時間保持する従来の方法とは異なります。



従来のケアの場合

- 従来の機械的な体位変換は身体がずれて危険
- 大きな体位変換により、睡眠が妨げられる
- 体力面や精神面など、介護者さまの負担が大きい

スモールチェンジ「ラグーナ」の場合

- 体位変換時の動きが小さく、安心かつ安全
- 小さな体位変換により、睡眠を妨げない
- 体力面や精神面など、介護者さまの負担を軽減




ラグーナで軽減

療養者の快眠を守り、介護者さまの負担を減らします。


■ハイブリッド構造でムレを防止

圧切替×スモールチェンジ×ムレ対策素材が、マットレス内の熱や湿気を排気します。

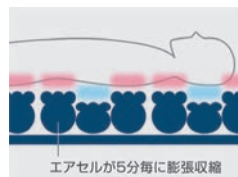


エアセルの圧切替

独立したエアセルが膨張収縮を繰り返し、5分毎に身体の保持面が切り替わります。これにより常時肌とマットレスが密着せず、不快なムレを軽減します。

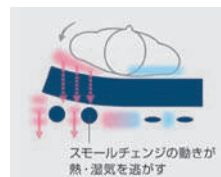

スモールチェンジ機能

スモールチェンジの動きにより、身体とマットレスの接触面やマットレス内部にこもった熱や湿気を逃します。

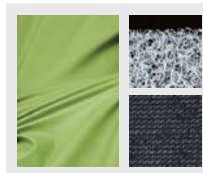

ムレ対策素材

優れた防水性を保ちながら、熱と熱気のみを透過する透湿・防水カバーや三次元スプリング構造体プレスエアアーマーやメッシュカバーなどムレ対策素材を使用しています。

自動ヘッドアップ

マットレスに内蔵したセンサがヘッドアップ角度を検知。角度に応じて、マットレスのやわらかさと動きを最適な状態に自動調整します。

4段階やわらかさ調整

全てのベッドに適合



安全機能
30°を超えるとスモールチェンジが自動オフ

底づき防止 エアセルが体重をしっかりと支え、底づきのリスクを防ぎます。

材質

マットレスカバー:ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎)

サイズ

エアポンプ:幅365×高さ246×奥行87mm(ポンプフック装着時/幅365×高さ276×奥行157mm)

重量

エアポンプ:3.4kg

タイプ	品番	マットレス サイズ&重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
900	CR-703	幅900×長さ1920×厚さ135mm/8.6kg	00206-000103	06-2000-0				
900/SHORT	CR-707	幅900×長さ1800×厚さ135mm/8.2kg	00206-000105	06-2001-0				
840	CR-700	幅840×長さ1920×厚さ135mm/8.2kg	00206-000102	06-2002-0				

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)